


User's Manual

使い方説明書

製品仕様




製品の使い方

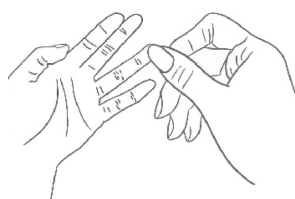


① マッサージ

薬指の先端をよくマッサージします。

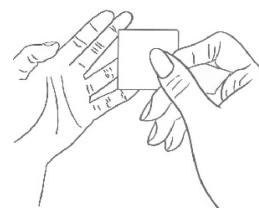


② 消毒

アルコール布で採血する周辺をよく拭きます。

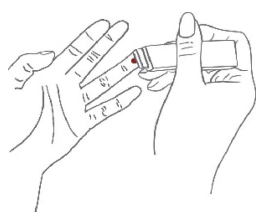


③ 穿刺

透明キャップを外し、白色部分を指先の腹にパチンと音がするまで押し当ててください。

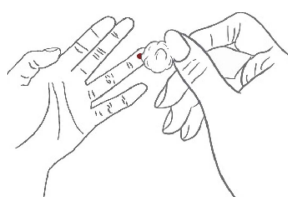

④ 消毒

血液が自然に流れた後、最初の1滴を無菌のドライコットンボールで拭き取ります。

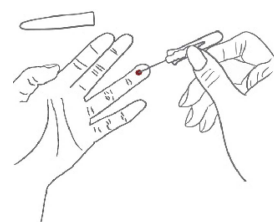


⑤ 資料収集

使い捨てマイクロピペットの目盛りに血液を吸い取り、無菌のドライコットンボールで傷を押して出血を止めます。血流が不十分な場合は、左手の薬指(手のひらから指先に向かって)を少し押して、血液を流出させます。



⑥ 試料をたらす

合計20μlの全血をテストカセットのサンプル穴にたらします。

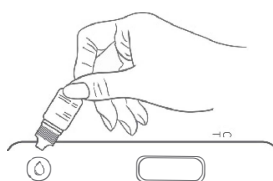

⑦ 希釈液

テストカセットのサンプル穴に2~3滴の希釈液を入れ、タイマーを開始します。




⑧ 読み取り

テストカセットを室温で10分ほど放置して、結果を読み取ります。20分を超えるテスト結果は無効となります。

検査結果について

使い捨ての無菌採血針を持ち、右手で指先の腹側尺骨側に2~3 mmの深さで穴を開け、すぐに針を引き出します。

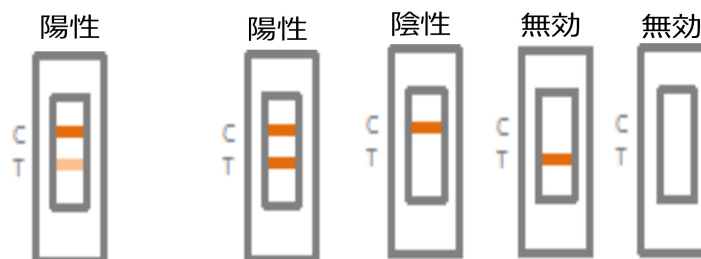

Tラインの発色 薄い → 濃い
中和抗体の濃度 低い → 高い